



Equi-Pak CS™ (REF 46122)

Es una resina líquida a base de uretanos, de secado rápido, 25 segundos, con agregado de sulfato de cobre para el tratamiento de la podredumbre de ranilla, que permite un soporte amortiguado, durable y que absorbe el impacto reteniendo su forma y flexibilidad indefinidamente.

Equi-Pak CS puede ser utilizada con o sin plantillas y se adhiere a la suela protegiéndola de toda humedad y suciedad, protegiendo la suela y la ranilla al mismo tiempo. Equi-Pak dejara la suela en excelente condición, eliminando el medio necesario para la proliferación de bacteria.

POR FAVOR CONSIDERE

- **Vettec provee productos que deben ser usados entre (18°C to 30° C).**
- Areas húmedas o sangrantes no deben ser cubiertas. Una vez cicatrizado, comience a utilizar el producto.
- Recomendamos la utilización de guantes de latex o goma.
- **No quemé o aplique la herradura en caliente sobre el producto.**
- **Utilice solo las puntas mezcladoras Vettec.**

PREPARACION DEL CARTUCHO

1. Para abrir el cartucho, corte la punta por la línea marcada utilizando tenazas de corte. Inserte el cartucho en la pistola dispensadora con la etiqueta hacia arriba
2. Antes de colocar la punta mezcladora, equalice el cartucho expulsando una pequeña cantidad de material hasta asegurarse que ambos lados del cartucho son expulsados igualmente.
3. Coloque la punta mezcladora presionando y girando en el sentido de las agujas del reloj.
4. **Al terminar, no libere la presión de la manija dispensadora. Remueva la punta mezcladora inmediatamente, descarte la punta y utilice una tapa a rosca Vettec.**
La presión sobre la manija puede ser ahora liberada.
Las tapas están disponibles en su distribuidor.
5. Para aplicaciones siguientes, equalice nuevamente el cartucho y aplique una nueva punta.

PREPARACIÓN DEL CASCO

1. Prepare y recorte la suela según sea necesario, dejando parte de la suela exfoliada. Remueva la mayor parte de la podredumbre utilizando una gubia
2. **Seque a conciencia** utilizando una pistola de calor o un secador de pelo. No sobrecaliente.

PROCEDIMIENTO

Con Plantillas

- 1a. **Si esta abierto en los talones:** Coloque la punta bajo la plantilla en los talones y llene hasta el final de esta
- 1b. **Si no tiene acceso:** taladre un agujero de 8 mm. En la plantilla cerca del apex de la ranilla y clávelo en posición bajo la herradura. Coloque la punta mezcladora contra el agujero y dispense hasta que este llena la parte posterior de la plantilla Cubre el agujero con cinta.
2. Una vez secado, en aproximadamente 45 segundos, puede bajar el casco.
3. Reemplace la punta y repita el proceso si es necesario.

Sin Plantilla

1. Limpie con un cepillo de alambre. **Corte un trozo de Equi-Mesh (REF 46030)** en la línea de la herradura y colóquela entre el casco y la herradura, con la parte curvada hacia la suela.
2. Clave la herradura en su posición. Si la suela es plana, preparar un seating en la herradura es aconsejado. seque la suela con una pistola de calor o secador de pelo.
3. Con la ranilla hacia arriba, aplique Equi-Pak CS por debajo del contorno de la herradura y llene el espacio de la suela hasta llegar al nivel deseado. Este es usualmente hasta al nivel de la herradura.
4. **NOTA:** Para soporte adicional, apoye a nivel de piso utilizando **Foam Board (REF 46015)**.
5. Sostenga el casco hasta que Equi-Pak seque, aproximadamente 45 segundos, luego suéltelo.

Siga las instrucciones con cuidado. Si su tipo de aplicación no se encuentra en estas instrucciones, llame al 800/483-8832 antes de usar este producto. El comprador acuerda a que el fabricante se compromete exclusivamente en caso de probar que el producto es defectuoso a cambiar el cartucho defectuoso o a la devolución del dinero de compra de la cantidad defectuosa.

El fabricante no se hace responsable del mal uso directo, indirecto y sus consecuencias.

© 08-2006