

Mode d'emploi pour EQUI-PAK®



PREPARATION DE LA CARTOUCHE

1. Pour ouvrir la cartouche, retirer l'embout avec une pince ou un couteau. Insérer la cartouche dans le pistolet distributeur, face étiquetée visible.
2. Avant de monter la canule de mélange, presser sur la cartouche afin de vérifier que le produit s'écoule des deux côtés.
3. N'utiliser que les canules de mélange Equi-Thane. Monter la canule de mélange en la vissant dans le sens des aiguilles d'une montre (si l'on utilise les petites cartouches 48 cc, l'embout de la canule peut être découpé pour agrandir l'ouverture).
4. En fin de travail, retirer et jeter la canule et remettre le bouchon fourni.

N.B Ne pas recouvrir les zones humides, hémorragiques ou infectées. Equi-Thane ne devra être utilisé qu'après la cicatrisation.
Température idéale de travail pour Equi-Thane 18°C-30°C

EQUI-PAK®

Conçu pour une utilisation avec ou sans coussinet. Equi-Pak est un matériau uréthane liquide servant à enrober le sabot et prend en 25 secondes. Equi-Pak adhère à la fois à la sole et au coussinet (si existant), crée une barrière étanche contre l'humidité et les débris et protège ainsi la fourchette et la sole. Equi-Pak fait office d'amortisseur et conserve sa forme et sa souplesse indéfiniment. Utilisé avec ou sans coussinet, Equi-Pak conserve la sole en excellent état (plus de sole délabrée). Si le produit est utilisé dans le cadre d'une médication, retirer Equi-Pak pour les contrôles et puis procéder à une nouvelle application - inutile de retirer le fer et le coussinet.

Note 1: Lorsqu'il fait chaud, il est possible qu'Equi-Pak polymérise à une température plus élevée.

Dans de tels cas, on peut appliquer Equi-Pak en couches pour réduire le dégagement de chaleur.

Note 2: Equi-Pak adhère aux coussinets cuir et caoutchouc ainsi qu'à certains types de coussinet à base de polyéthylène.

Procédure:

Coussinet en place:

1. Après avoir riveté le fer et le coussinet, positionner la canule de mélange d'Equi-Pak entre la fourchette et le coussinet aussi loin que possible puis actionner le pistolet au fur et à mesure que le matériau se répand.
Note: en présence de talons écrasés, on peut appliquer Equi-Pak à travers un trou foré sur 1 cm dans le coussinet à proximité de l'apex de la fourchette.
2. Equi-Pak s'écoulera à travers la canule et viendra remplir les vides. Remplir jusqu'à l'extrémité du coussinet. Après la prise du matériau soit environ 25 secondes, relâcher le sabot.
3. Repositionner la canule et répéter la procédure autant de fois que nécessaire.

Sans coussinet:

1. Meuler et rogner la sole. Frotter la sole soigneusement avec de l'alcool dénaturé et une brosse métallique. Pour une parfaite rétention, sécher avec un pistolet thermique ou un séchoir à cheveux. Riveter le fer.
2. La fourchette dirigée vers le haut, appliquer Equi-Pak sous le bord du fer et remplir la sole jusqu'au niveau désiré, généralement jusqu'à la base du fer.
3. Maintenir le sabot jusqu'à la prise de Equi-Pak (25 secondes) puis relâcher.

Restriction d'emploi: Respecter soigneusement les instructions. Si votre cas pratique n'est pas traité dans ces instructions, appelez le 800/483-3162 avant d'utiliser ce produit. L'acheteur convient du fait que si les produits Vettec s'avèrent défectueux, le seul recours de l'utilisateur sera, au choix du fabricant, le remplacement du produit Vettec défectueux ou le remboursement du prix d'achat correspondant à la quantité défectueuse. Le fabricant n'est pas responsable des dommages directs, indirects, accessoires ou consécutifs, quelles que soient les dispositions légales invoquées, y compris la négligence caractérisée et la responsabilité stricte.

05/12