

Instrucciones para el uso de EQUI-PAK®



Preparación del cartucho

1. Para abrir el cartucho, corte la punta, por el lugar indicado, con una tijera o cuchillo. Introduzca el cartucho en la pistola dosificadora con la etiqueta hacia arriba.
2. Antes de colocar la boquilla dosificadora, haga una ligera presión para asegurarse de que el producto sale por ambos lados.
3. Utilice únicamente boquillas Equi-Thane.
La boquilla se coloca presionando y girando simultáneamente en la dirección de las manecillas del reloj. (Si utiliza el cartucho pequeño, de 48 cc, puede cortar la punta para obtener una abertura mayor).
4. Una vez terminada la aplicación, retire la boquilla y coloque el tapón adjunto.

Nota: No debe aplicarse sobre áreas húmedas, sangrantes o infectadas.
Una vez sano, puede iniciarse la aplicación de Equi-Thane.
Equi-Thane actúa mejor a una temperatura entre los 18°C y los 30°C.

EQUI-PAK®

Equi-Pak puede utilizarse con o sin almohadilla. Es un uretano líquido utilizado para la protección del casco que endurece en 25 segundos. Equi-Pak se adhiere tanto a la suela como a la almohadilla (si se utiliza) sellando el paso de humedad y suciedad y protegiendo, de esta forma, la ranilla y la suela. Equi-Pak mantiene su forma y flexibilidad proporcionando apoyo amortiguado por largo tiempo. Sin importar si se utiliza o no la almohadilla, Equi-Pak se encarga de mantener la suela en excelentes condiciones. Si se utiliza como un método para proteger la aplicación de medicaciones, retire el Equi-Pak, revise las condiciones del área afectada y proceda luego a colocarlo nuevamente. Para esto, no es necesario retirar ni la herradura ni la almohadilla.

Nota 1: En climas cálidos, Equi-Pak se endurece a una temperatura más alta. Bajo estas condiciones, cuando la temperatura es un factor influyente, aplique Equi-Pak en capas para reducir el tiempo de endurecimiento.

Nota 2: Equi-Pak se adhiere a las almohadillas de cuero y de caucho y también a algunos tipos de almohadillas de polietileno.

Aplicación:

Con almohadilla:

1. Una vez se ha colocado la herradura y la almohadilla, coloque la boquilla dosificadora de Equi-Pak lo más adelante posible, entre la ranilla y la suela. Retire la pistola una vez aplicado el material.

Nota: En casos de malformación o desgaste de los talones, se puede aplicar Equi-Pak a través de un orificio de 1 cm abierto en la almohadilla, cerca al vértice de la ranilla.

2. Vierta Equi-Pak en forma abundante hasta cubrir completamente el orificio. Una vez endurecido el producto, unos 25 segundos, puede soltar el casco.
3. Cambie la boquilla dosificadora y, de ser necesario, repita el procedimiento.

Sin almohadilla:

1. Recorte y lime la suela. Límpiela profundamente con alcohol desnaturalizado y un cepillo de alambre. Para una mejor fijación, seque el área (puede utilizar un secador para el cabello). Fije la herradura en la posición correcta.
2. Aplique Equi-Pak por el borde de la herradura, con la ranilla vuelta hacia arriba, y rellene la suela hasta alcanzar el nivel deseado (usualmente hasta la base de la herradura).
3. Sostenga el casco hasta que el Equi-Pak haya endurecido (25 segundos).

Recurso limitado: Siga atentamente las instrucciones. Si estas instrucciones no cubren su aplicación, llame al 800/483-8832 antes de utilizar este producto. El comprador acuerda que en caso de defecto de los productos Vettec, el único recurso del usuario será, a elección del fabricante, el reemplazo del producto defectuoso o el reembolso del precio de compra de la cantidad defectuosa. El fabricante no se responsabiliza de los daños directos, indirectos o resultantes, independientemente de la teoría legal sostenida, incluyendo aserto de negligencia y responsabilidad absoluta.

05/12