

**Sabot personnalisé /
Extension de sabot pour les poulains
Mode d'emploi pour
Equi-Thane Super Fast**



Préparation de la cartouche

1. Pour ouvrir la cartouche, retirer l'embout avec une pince ou un couteau. Insérer la cartouche dans le pistolet distributeur, face étiquetée visible.
2. Avant de monter la canule de mélange, presser sur la cartouche afin de vérifier que le produit s'écoule des deux côtés.
3. N'utiliser que les canules de mélange Equi-Thane. Monter la canule de mélange en la vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. En fin de travail, laisser la canule en place car elle servira de bouchon. Il vous suffira ensuite de la dévisser, de vérifier l'écoulement du produit des deux côtés et de mettre une nouvelle canule.

N.B Ne pas recouvrir les zones humides, hémorragiques ou infectées. Equi-Thane ne devra être utilisé qu'après la cicatrisation. Température idéale de travail pour Equi-Thane 18°C-30°C

Sabot personnalisé:

1. Tailler, gratter et égaliser comme pour la pose d'un fer classique. Éliminer toute paroi affaiblie ou endommagée.
2. Sécher soigneusement la zone. Si le sabot est très humide et/ou huileux, nettoyer avec un peu d'alcool dénaturé et sécher.
3. Tenir le sabot à la verticale et appliquer Super Fast là où devrait venir se loger le fer. L'épaisseur de couche doit être d'environ 2 cm et s'étendre sur env. 2-3 cm.
4. Tenir le pied pendant une minute et puis le reposer. **N.B.** Par temps froid, réchauffer le pied et le matériau avant utilisation afin d'accélérer le temps de prise.
5. Gratter et meuler le matériau à la forme de fer désirée.
6. Si nécessaire, ajouter du Super Fast à votre fer personnalisé afin d'obtenir la forme et la profondeur que vous souhaitez. Si le pied a été reposé et sali, il suffit de gratter pour nettoyer et d'ajouter du matériau.
7. Sur des surfaces glissantes, aménager des rainures pour une meilleure traction.

Extension de sabot pour les poulains:

N.B. *Pour cette opération, privilégier les gants en latex ou caoutchouc.*

1. Tailler, gratter et égaliser le sabot comme d'habitude. Éliminer toute paroi affaiblie ou endommagée.
2. Sécher la zone soigneusement. Si le sabot est très humide et/ou huileux, nettoyer avec un peu d'alcool dénaturé et sécher.
3. Tenir le sabot à la verticale et appliquer une fine couche (1 cm à chaque fois) de Super Fast tout autour de la paroi du sabot. Lisser avec un doigt ganté et laisser prendre env. 45 secondes. Appliquer une seconde couche et une troisième (si nécessaire) de la même façon jusqu'à obtenir la forme et la longueur voulues.
4. Tenir le pied jusqu'à ce que le matériau soit ferme au toucher et le relâcher.
N.B. Par temps froid, réchauffer le pied et le matériau avant utilisation afin d'accélérer le temps de prise.
5. Gratter et meuler le matériau pour obtenir l'allongement désiré.
6. Si nécessaire, ajouter du Super Fast à la partie rajoutée afin d'obtenir la forme et la profondeur que vous souhaitez. Si le pied a été reposé et sali, il suffit de gratter pour nettoyer et d'ajouter du matériau.
7. En raison de la rapidité de prise de Super Fast, vous aurez besoin d'une canule de mélange par couche appliquée. S'assurer d'un stock suffisant de canules avant de commencer le travail.

Restriction d'emploi: Respecter soigneusement les instructions. Si votre cas pratique n'est pas traité dans ces instructions, appelez le 800/483-3162 avant d'utiliser ce produit. L'acheteur convient du fait que si les produits Vettec s'avèrent défectueux, le seul recours de l'utilisateur sera, au choix du fabricant, le remplacement du produit Vettec défectueux ou le remboursement du prix d'achat correspondant à la quantité défectueuse. Le fabricant n'est pas responsable des dommages directs, indirects, accessoires ou consécutifs, quelles que soient les dispositions légales invoquées, y compris la négligence caractérisée et la responsabilité stricte.

05/12