

# Instrucciones de aplicación para la herradura a medida/ extensión del potro para **Equi-Thane Super Fast**



## Preparación del cartucho

1. Para abrir el cartucho, corte la punta, por el lugar indicado, con una tijera o cuchillo. Introduzca el cartucho en la pistola dosificadora con la etiqueta hacia arriba.
2. Antes de colocar la boquilla dosificadora, haga una ligera presión para asegurarse de que el producto sale por ambos lados.
3. Utilice únicamente boquillas Equi-Thane. La boquilla se coloca presionando y girando simultáneamente en la dirección de las manecillas del reloj.
4. Una vez terminada la aplicación, retire la boquilla y coloque el tapón adjunto.

**Nota:** No debe aplicarse sobre áreas húmedas, sangrantes o infectadas. Una vez sano, puede iniciarse la aplicación de Equi-Thane. Equi-Thane actúa mejor a una temperatura entre los 18°C y los 30°C.

## Aplicación para la herradura a medida

1. Recorte, raspe y nivele el casco para un herrado normal. Elimine cualquier pared quebradiza o dañada.
2. Seque completamente la zona. Si el casco estuviera muy húmedo o grasiento, use un poco de alcohol desnaturalizado para limpiarlo y luego séquelo.
3. Mantenga el caso en posición vertical y aplíquelo Super Fast en el mismo lugar en el cual se colocaría la herradura. El material debería tener aproximadamente 1 cm de grueso y 2-3 cm de ancho.
4. Sostenga la pata durante un minuto y después suéltela. Nota: si el tiempo es frío, mantenga caliente la pata y el material antes de usarlo para acelerar los tiempos de secado.
5. Raspe y recorte el material según el tamaño de la herradura.
6. Si fuera necesario, añada más Super Fast a la herradura a medida para obtener la forma y el grosor deseado. Si la pata está en el suelo y se ha ensuciado, solamente tendrá que raspar y añadir más material.
7. Sobre superficies resbaladizas, marque unas muescas en la parte inferior para aumentar la tracción.

## Aplicación para la extensión del potro:

**Nota:** Para efectuar este procedimiento con garantías es mejor utilizar guantes de látex o degoma.

1. Recorte, raspe y nivele el casco como se realiza habitualmente. Elimine cualquier pared quebradiza o dañada.
2. Seque completamente la zona. Si el casco estuviera muy húmedo o grasiento, use un poco de alcohol desnaturalizado para limpiarlo y luego séquelo.
3. Mantenga el casco vertical y aplique una capa de poco espesor (6 mm. de una vez) de Super Fast, alrededor de la pared del casco. Pase suavemente el dedo protegido con el guante y espere unos 45 seg. Del mismo modo, aplique una segunda capa y, si fuera necesario, una tercera, hasta que se obtenga la forma y la extensión deseada.
4. Sujete la pata hasta que el Super Fast solidifique y después ya puede soltarla.  
**Nota:** si el tiempo es frío, mantenga caliente la pata y el material antes de usarlo para acelerar los tiempos de secado.
5. Raspe y recorte el material hasta la forma extendida deseada.
6. Si fuera necesario, añada más Super Fast a la extensión para obtener la forma y el grosor deseado. Si la pata está en el suelo y se ha ensuciado, solamente tendrá que raspar, limpiar y añadir más Super Fast.
7. Debido a la rapidez de secado del Super Fast, será necesario disponer de una placa de mezcla por capa aplicada. Antes de empezar, compruebe que dispone de las placas suficientes.

**Recurso limitado:** Siga atentamente las instrucciones. Si estas instrucciones no cubren su aplicación, llame al 800/483-8832 antes de utilizar este producto. El comprador acuerda que en caso de defecto de los productos Vettec, el único recurso del usuario será, a elección del fabricante, el reemplazo del producto defectuoso o el reembolso del precio de compra de la cantidad defectuosa. El fabricante no se responsabiliza de los daños directos, indirectos o resultantes, independientemente de la teoría legal sostenida, incluyendo aserto de negligencia y responsabilidad absoluta. 05/12